

Pokyny k odběru – ptáci

Vyšetření provádíme ze vzorků krve, peří nebo skořápky. Při získávání biologického materiálu dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku. Kontaminace naprosto znehodnotí vyšetření (např. falešně pozitivní výsledky u infekcí, nemožnost určení pohlaví, atd.). Laboratoř nezodpovídá za chyby vyšetření způsobené kontaminací vzorku, nevhodným materiálem k vyšetření, špatně/nečitelně označeným vzorkem či záměnou vyšetřovaných jedinců. **Pokud odebíráte vzorky od více jedinců, použijte jednorázové rukavice na každého jedince nebo si pečlivě umyjte ruce po každém odběru, zamezíte tak kontaminaci vzorku.**

U směsných vzorků lze současně vyšetřit až tři jedince (pouze infekce). Při odběru materiálu postupujte dle níže uvedeného postupu, nedávejte vzorky do jedné společné zkumavky, ale odděleně, totéž platí i pro vyplnění žádanky (pro každého jedince příslušná žádanka, do poznámky uveďte, že požadujete směsný vzorek na vyšetření infekcí, nebo nejdříve určení pohlaví u jednotlivých vzorků a směsný vzorek na vyšetření infekcí). U každého jedince je provedena izolace DNA a kontrola kvality izolované DNA, část vzorku DNA je uchována pro kontrolu či dovyšetření (např. při pozitivním výsledku směsného vzorku na infekce můžeme na žádost zákazníka otestovat každého jedince zvlášť).

Peří

Pro analýzu DNA lze použít 3 – 5 tzv. „živých per“, to znamená peří obsahující pulpu (dřeň). Vytržená pera ihned uschovejte do igelitového sáčku a uzavřete, pečlivě označte – shodně s identifikačními údaji na žádance.

Krev

Odběr krve se provádí na odběrový tampon, který zasíláme na vyžádání nebo předáme na burzách/výstavách. Pootočením uzávěru otevřete tubus s odběrovým tamponem, tamponem nasajte vzorek krve, stačí 1 – 2 kapky. Vhodný je vzorek kapilární krve, např. z drobného vpichu do prstu či odstřížením konečku drápu. Tampon ihned vložte do tubusu, ale úplně nezavírejte, nechte cca 20 minut nebo déle, dle množství krve uschnout, pečlivě označte údaji shodnými s údaji na žádance.

U vyšetření PBFĐ doporučujeme odebrat i vzorek peří, zejména u jedinců vykazujících podezřelé příznaky.

Skořápka

Je nutné, aby chovatel přesně věděl od jakého mláděte skořápka je (nejvhodnější pro umělé inkubace). Ihned po vylíhnutí mláděte odeberte skořápku, nesahejte dovnitř a nechte skořápku 1 – 2 dny uschnout při pokojové teplotě, poté vložte skořápku do pevného obalu, aby se při transportu nerozdrtila. Sahejte jen na vnější část skořápky a obal se skořápkou označte identifikačními údaji shodnými s údaji na žádance.

Platební podmínky

Přijímáme platby v hotovosti nebo bankovním převodem na účet: 2700600591/2010, jako variabilní symbol uveďte, prosím, Vaše telefonní číslo nebo PSČ. Vzorky zpracováváme co nejdříve, ale výsledky vydáváme až po obdržení platby – děkujeme za pochopení. Výsledky je možné zaslat e-mailem nebo poštou.

Vzorky zasílejte na adresu:

DiaGen, Ing. Jaroslava Galbavá, Žďár 64, 400 02 Velké Chvojno

!!! Po předchozí domluvě je možné provést odběr přímo u chovatele nebo na burzách či výstavách (čím více vzorků, tím nižší cena, takže je výhodné, pokud se domluví více chovatelů) !!!

Aktuální ceník (od 1.5.2014)**Aktuelle Preisliste - Einzelproben (ab 1.5.2014)**

Test/počet vzorků, cena (CZK/€) Untersuchungsliste/Anzahl der Proben (CZK/€)	1 - 5	6 - 10	11 – 20	21 - 30	31 a více/und mehr
Test pohlaví (CHD1 a CHD2) Geschlechtstest (CHD1 und CHD2)	360,-/ € 13,40	340,-/ € 12,60	320,-/ € 11,90	300,-/ € 11,10	280,-/ € 10,40
PCR detekce Chlam. Psittaci PCR Detektion Chlam. psittaci (Chlamydieninfektion)	690,-/ € 25,60	590,-/ € 21,90	520,-/ € 19,40	450,-/ € 16,70	420,-/ € 15,50
PCR detekce PBFD (onem. zobáku a peří) PCR Detektion PBFD (Schnabel- und Federerkrankungen)	650,-/ € 24,00	560,-/ € 20,80	500,-/ € 18,50	440,-/ € 16,30	400,-/ € 14,80
PCR detekce APV (BFD, Polyomaviroza)/ PCR Detektion der <i>Polyomavirose</i> der Vogel (APV/BFD)	650,-/ € 24,00	560,-/ € 20,80	500,-/ € 18,50	440,-/ € 16,30	400,-/ € 14,80
Kombinace: PBFD + APV Kombination von: PBFD + APV	690,-/ € 25,60	590,-/ € 21,90	520,-/ € 19,40	450,-/ € 16,70	420,-/ € 15,50
Kombinace: PBFD + APV + Chlam. psittaci Kombination von: PBFD + APV + Chlam. Psittaci	1300,-/ € 48,20	1200,-/ € 44,50	1100,-/ € 40,80	1000,-/ € 37,00	900,-/ € 33,40
Kombinace: Test pohlaví + PBFD + APV Kombination von: Geschlechtstest + PBFD + APV	990,-/ € 36,70	890,-/ € 33,00	790,-/ € 29,40	690,-/ € 25,60	590,-/ € 21,90
Kombinace: Test pohlaví + PBFD + APV + Chlam. Psittaci Kombination von: Geschlechtstest + PBFD + APV + Chlam. Psittaci	1600,-/ € 60,00	1500,-/ € 55,60	1400,-/ € 51,90	1300,-/ € 48,20	1250,-/ € 46,30

Aktuální ceník – směsné vzorky (max. po 3 kusech)**Aktuelle Preisliste - Mischproben (ab 1.5.2014) (Mischproben bestehend aus 3 Proben)**

Test/počet vorků, cena (CZK/€) Untersuchungsliste/Anzahl der Proben (CZK/€)	1 - 6	7 - 12	13 - 21	22 - 30	31 a více/ und mehr
PCR detekce Chlam. Psittaci PCR Detektion Chlam. psittaci (Chlamydieninfektion)	1040,-/ € 38,60	890,-/ € 33	780,-/ € 28,90	670,-/ € 24,90	630,-/ € 23,40
PCR detekce PBFD (onem. zobáku a peří) PCR Detektion PBFD (Schnabel- und Federerkrankungen)	980,-/ € 36,30	840,-/ € 31,20	750,-/ € 27,80	660,-/ € 24,50	600,-/ € 22,30
PCR detekce APV (BFD, Polyomaviroza) PCR Detektion der <i>Polyomavirose</i> der Vogel (APV/BFD)	980,-/ € 36,30	840,-/ € 31,20	750,-/ € 27,80	660,-/ € 24,50	600,-/ € 22,30
Kombinace: PBFD + APV Kombination von: PBFD + APV	1040,-/ € 38,60	890,-/ € 33,00	780,-/ € 28,90	680,-/ € 25,20	630,-/ € 23,40
Kombinace : PBFD + APV + Chlam. Psittaci Kombination von: PBFD + APV + Chlam. psittaci	1950,-/ € 72,30	1800,-/ € 66,70	1650,-/ € 61,10	1500,-/ € 55,60	1350,-/ € 50,00

V ceně testu je zahrnut nylonový odběrový tampon.